



# Westfalen

Westfalen Gassen Nederland BV  
Postbus 779  
7400 AT Deventer  
tel: 0570-858 450  
fax: 0570-858 451  
e-mail: medisch@westfalengassen.nl  
www.westfalenmedisch.nl

## Uw leverancier

Indien u vragen heeft over het gebruik van de zuurstof en/of bestellingen, belt u dan gerust Westfalen Gassen Nederland BV. Voor de normale bestellingen van zuurstof en gebruiksartikelen of, voor vragen daarover, kunt u ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur bereiken op onderstaand telefoonnummer

### 0570-858 450

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op hetzelfde telefoonnummer.

Raadpleeg de meegeleverde handleiding indien u vragen heeft omtrent het gebruik van de voorziening.

## Let op!

Ventileer de ruimte waar u de zuurstof gebruikt goed.



Gebruik geen olie of vet bij of aan de cilinder, drukregelaar of concentrator.



Niet roken in de ruimte waar zuurstof gebruikt wordt.



Geen open vuur in de ruimte waar de zuurstof gebruikt wordt.



Indien u elektrische apparaten (zoals een föhn, of elektrisch scheerapparaat) gebruikt, stop dan even met het gebruik van de zuurstof.



Zet de flow op '0' of draai de cilinder even dicht bij het aan- of uitkleden.



**Dit hulpmiddel is in bruikleen verstrekt en moet na beëindiging van het gebruik aan Westfalen Gassen Nederland BV worden geretourneerd.**

# Zuurstofcilinders

## Vervangen cilinder

Draai de afsluiter van de cilinder **met de klok** mee dicht, met behulp van de handwartel of met de meegeleverde cilindersleutel.

Draai de instelknop van de flowmeter open en laat de zuurstof uitstromen tot de inhoudsmeter op 0 staat (de drukregelaar is dan drukloos).

Indien de inhoudsmeter op 0 staat, kunt u de drukregelaar, **tegen de klok in**, losschroeven van de cilinder. Neem een nieuwe cilinder, verwijder het plastic dopje en vervolg de procedure, zoals omschreven in „**aansluiten cilinder**”.

## Aansluiten/gebruik cilinder

Zorg dat de cilinder (10l) vast staat, met behulp van de beugel, in het cilinderwagentje.

Verwijder het plastic dopje uit de opening van de cilinderafsluiter.

Plaats de drukregelaar met de handwartel tegen de cilinderafsluiter en draai met de hand en met de klok mee de drukregelaar vast op de afsluiter.

Gebruik geen steeksleutel of ander gereedschap om de drukregelaar geforceerd aan te sluiten.

Sluit de bevochtiger aan op de drukregelaar.

Sluit de (verleng)slang met de zuurstofbril aan op de slangtule van de bevochtiger of van de drukregelaar.

Draai de afsluiter van de cilinder tegen de klok in open, met de handwartel of met de meegeleverde cilindersleutel.

Controleer de stand van de inhoudsmeter (bij een volle cilinder) geeft deze 200 bar aan.

Draai de instelknop van de flowmeter met de klok mee, totdat deze ingesteld is op het door uw arts voorgeschreven aantal liters per minuut.

**Bevestig deze instructiekaart aan de cilinder met een elastiekje zodanig dat deze altijd goed zichtbaar is.**